



ÄTZEND

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Bewahren Sie EndWarts CLASSIC für Kinder unzugänglich auf.

1. Was ist EndWarts CLASSIC und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von EndWarts CLASSIC beachten?
3. Wie ist EndWarts CLASSIC anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist EndWarts CLASSIC aufzubewahren und weitere Informationen

BITTE SCANNEN SIE HIER, UM MEHR ÜBER DIE ANWENDUNG VON EndWarts CLASSIC ZU ERFAHREN



EndWarts® CLASSIC

1. WAS IST ENDWARTS CLASSIC UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

EndWarts CLASSIC ist eine wirksame Lösung zur Entfernung von Warzen, die sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen zur Behandlung von Warzen an Händen, Füßen, Ellbogen und Knien angewendet werden kann. EndWarts CLASSIC hilft dem Körper die Warzen auszutrocknen und abzustößen. Die Lösung dringt direkt in die Warze ein. EndWarts CLASSIC hinterlässt keine Spuren auf der Haut und ist nicht sichtbar. So können beispielsweise direkt nach dem Auftragen Strümpfe angezogen oder ein Bad genommen werden.

EndWarts CLASSIC ist ein in Schweden patentiertes Medizinprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt und biologisch abbaubar ist. Die Eigenschaften der Lösung verhindern ein Wachstum von Bakterien. EndWarts CLASSIC verursacht bei korrekter Anwendung weder Narben noch führt es zu Infektionen. Eine Flasche EndWarts CLASSIC reicht für ca. 30 Behandlungen von 1–5 Warzen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON EndWarts CLASSIC BEACHTEN?

2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS CLASSIC NICHT ANWENDEN

- Verwenden Sie EndWarts CLASSIC nicht bei Gesichtswarzen, Warzen im Genitalbereich, Dellwarzen, Muttermalen, Hühneraugen, Hautverhärtungen oder anderen Hautveränderungen.
- Verwenden Sie EndWarts CLASSIC nicht in Kombination mit einem Pflaster. Die Anwendung eines Pflasters während der Behandlung kann zu Hautschäden führen, siehe 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
- Verwenden Sie EndWarts CLASSIC nicht, wenn die behandelte Warze empfindlich wird, blutet oder Irritationen auftreten. Dann muss die Behandlung unterbrochen werden, bis sich die Haut erholt hat.
- Verwenden Sie EndWarts CLASSIC nicht in Kombination mit anderen Warzentfernungsmethoden.
- Verwenden Sie EndWarts CLASSIC nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 5. genannten sonstigen Bestandteile sind

2.2 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



EndWarts CLASSIC ist **ätzend** und hat einen starken reizenden Geruch. Nicht einatmen. Nur zur äußerlichen Anwendung. **Bewahren Sie EndWarts CLASSIC für Kinder unzugänglich auf.**

Nicht zu viel auftragen! Übermäßige oder fehlerhafte Anwendung kann Schmerzen und Hautschäden verursachen, siehe 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

- Wenn Sie eine größere Menge angewendet haben als Sie sollten, oder versehentlich Lösung auf Ihre Haut verschüttet haben, diese sofort mit reichlich Wasser abspülen, um Hautschäden möglichst gering zu halten.
- Sollte das Mittel in die **Augen** gelangen, diese sofort und wiederholt mindestens 15 Minuten lang mit lauwarmem Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Behandlung dünner Haut, zum Beispiel bei kleinen Kindern oder auf dem Handrücken, siehe 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG und 3.2 BEHANDLUNG VON KINDERN.

3. WIE IST ENDWARTS CLASSIC ANZUWENDEN?

3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Die Lösung wirkt bereits beim Auftragen sehr geringer Mengen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, da die Lösung ätzend ist. Benutzen Sie bitte ausschließlich die mitgelieferten Wattestäbchen. Um versehentliches Verschütten zu vermeiden, gehen Sie sehr behutsam bei der Anwendung vor.

Die Flasche sollte während der Anwendung nicht in der Hand gehalten werden. Stellen Sie die Flasche auf ein Waschbecken oder eine ähnliche Ablage. Kontakt mit verschütteter Lösung kann zu Schäden auf Ihrer Haut oder an gestrichenen Oberflächen, Textilien usw. führen. Nach der Anwendung den Verschluss wieder sorgfältig zuschrauben. Benutzte Wattestäbchen sollten vor dem Entsorgen mit Wasser abgespült werden.

1. Ein Wattestäbchen in EndWarts CLASSIC eintauchen und sorgfältig am Flaschenrand abstreifen. Das Wattestäbchen sollte nur feucht sein.
2. Betupfen Sie mit dem Wattestäbchen leicht eine Sekunde lang die Warze; diesen Vorgang ein- bis zweimal wiederholen. Achten Sie darauf, dabei die umgebende Haut nicht zu berühren.

Für ein erfolgreiches Ergebnis sollte die Warze **regelmäßig** einmal wöchentlich behandelt werden, bis sie vollständig verschwunden ist, da andernfalls der Prozess unterbrochen wird. Bei unregelmäßiger Anwendung kann die gesamte Behandlung länger dauern.

Wenn bei Erwachsenen die Behandlung **alter und/oder großer Warzen** nach 4-5 Wochen gut voranschreitet und die Haut nicht gereizt ist, kann das Mittel alle 5 Tage aufgetragen werden. **Nicht zu viel auftragen.**

Bei der Behandlung auf **dünnere Haut** ist teilweise eine geringere Menge der Lösung ausreichend. Streichen Sie das Wattestäbchen vor der Behandlung an einem Tuch ab. Führen Sie die Behandlung weniger häufig durch, beispielsweise jede zweite oder dritte Woche.

Bei der Behandlung **mehrerer Warzen** behandeln Sie bitte in den ersten zwei Wochen nur einige Warzen. Wenn die Haut nicht gereizt ist, können Sie danach mit der Behandlung der übrigen Warzen beginnen. Mehrere kleine Warzen können gleichzeitig behandelt werden, ohne dass das Wattestäbchen erneut in EndWarts CLASSIC eingetaucht werden muss (tauchen Sie das Wattestäbchen einmal in die Lösung, reicht dies für 1–5 oder teilweise mehr Warzen – je nach Warzengröße). Beginnen Sie mit den größten Warzen.

Die Warze sollte zwischen den Behandlungen durch Anwendung einer normalen Körperlotion oder eines Hautöls weich gehalten werden. Dann können die Hautreste der Warze leichter herausgelangen.

Zu Beginn der Behandlung kann die Warze auch weiß werden und zunächst nach außen wachsen, bevor sie auszutrocknen beginnt. Wenn die Warze wächst, kann die umliegende Haut druckempfindlich werden. Achten Sie darauf, ob die Warze mit einer Hautschicht bedeckt ist. Lesen Sie hierzu bitte weiter.

Sollte sich die Warze empfindlich anfühlen oder pochen, kann das daran liegen, dass zu viel Warzenmittel aufgetragen wurde, siehe 2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS CLASSIC NICHT ANWENDEN, und/oder dass die Warze nicht in der Lage ist, die Haut über der Warze zu durchbrechen. Wenn die Haut wie ein Deckel über der Warze liegt, ist sie z. B. mit einer Pinzette zu öffnen, damit die Warze herausgelangen kann. Bei einer alten oder harten Warze den betroffenen Bereich vor der Behandlung in warmem Wasser baden, um die Haut aufzuweichen. Entfernen Sie die Haut über der Warze, z.B. mit einer Pinzette. Bei dicker Haut auf nach innen wachsenden Warzen (Fußwarzen) die harte Haut vorsichtig entfernen. Bei Warzen am Nagelbett kann eine kleine Öffnung in der äußersten

Hautschicht erforderlich sein, damit das Mittel in die Warze eindringen kann. Warzen nicht abfeilen. Die Warzen werden dann möglicherweise druckempfindlich und bilden wieder eine neue harte Oberfläche.

Nach einigen Behandlungen sind meist schwarze Punkte in der Warze zu sehen. Dabei handelt es sich um kleine Kapillargefäße, die sie mit Blut versorgen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Warze abheilt, und die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, bis die schwarzen Punkte und die Warze vollständig verschwunden sind. Manchmal können die schwarzen Punkte etwas bluten, wenn an der Warze gekratzt wurde. Warten Sie mit dem Auftragen von EndWarts CLASSIC einige Minuten, bis die Blutung aufhört, da ansonsten ein leichtes Stechen auftreten kann. Spülen Sie in diesem Fall sofort mit kaltem Wasser, um den Schmerz zu lindern.

3.2 BEHANDLUNG VON KINDERN

Kinder dürfen nur von einem Erwachsenen behandelt werden. Befolgen Sie bitte genau 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG, da das Mittel ätzend wirkt. Kleine Kinder haben weiche, dünne Haut. Tragen Sie bei Kinderwarzen nur eine sehr geringe Menge EndWarts CLASSIC Lösung auf. Wenn Siedas Wattestäbchen einmal in die Lösung tauchen, reicht dies für mehrere Warzen. Die Warzen verschwinden in der Regel nach 2–3 Behandlungen.

Kinder **unter 4 Jahren** dürfen mit EndWarts CLASSIC behandelt werden; dabei jedoch immer darauf achten, dass es sich tatsächlich um eine Warze handelt und nicht um eine andere Hautschädigung. Konsultieren Sie vor der Behandlung Ihren Haus- oder Kinderarzt. Bei Kindern unter 4 Jahren ist es besonders wichtig, die Menge der aufzutragenden Lösung zu verringern. Behandeln Sie in größeren Abständen, z.B. jede zweite bis dritte Woche.

- Streichen Sie überschüssige Mengen der Lösung immer an einem Tuch ab, bevor Sie die Warze ein- bis zweimal leicht betupfen.
- Achten Sie darauf, die umgebende Haut nicht zu berühren.
- Falls das Kind dazu neigt, die behandelte Stelle in den Mund zu nehmen, können Sie den betroffenen Bereich nach der Behandlung mit Wasser abwaschen, da die Lösung sofort eindringt.
- Bei Brennen oder Stechen während der Behandlung die Warze mit kaltem Wasser abspülen und keine Lösung mehr auftragen, da diese bereits die Warze durchdrungen hat.

3.3 BEHANDLUNG VON DIABETIKERN

Diabetiker dürfen EndWarts CLASSIC nur an Warzen an gesunden Hautstellen (nicht durch die diabetische Erkrankung betroffen und geschädigt) und mit besonderer Vorsicht anwenden. Bei Problemen konsultieren Sie Ihren Arzt/Fußpfleger.

3.4 WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG MIT ENDWARTS CLASSIC?

EndWarts CLASSIC ist nachgewiesen wirksam gegen Warzen. Die meisten Warzen verschwinden, ohne wieder aufzutreten. Zuweilen können bereits unter der Haut liegende Warzen zum Vorschein kommen.

Warzen sind sehr verschieden in Größe und Erscheinung und daher kann die für die Entfernung erforderliche Zeit unterschiedlich lang sein. Die Behandlungsdauer kann variieren: Meist sind 5 bis 15 Behandlungen erforderlich, Abweichungen nach oben und unten sind möglich. Die erforderliche Behandlungsdauer bis zum Verschwinden der Warzen kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter das Alter des Patienten, die Art der Warze, das Immunsystem des Patienten, die Stelle, an der sich die Warze befindet und wie lange die Warze schon existiert. Eine herabgesetzte Immunabwehr und Medikamente wie z.B. Kortison sind Faktoren, welche die Behandlungsdauer verlängern können. Neue Warzen lassen sich meist leichter entfernen als alte. Kinderwarzen lassen sich meist leichter entfernen als Warzen bei Erwachsenen. Bei nach innen wachsenden Warzen und bei Warzen am Nagelbett, die bereits seit vielen Jahren existieren, kann es lange dauern, bevor Sie feststellen, dass die Behandlung Wirkung zeigt, und es dauert erheblich länger, bevor eine solche Warze vollständig verschwunden ist.

3.5 WANN SOLLTE DIE BEHANDLUNG MIT ENDWARTS CLASSIC BEENDET WERDEN?

Beenden Sie die Behandlung mit EndWarts CLASSIC, wenn keine schwarzen Punkte mehr sichtbar sind oder wenn die Warze abgefallen oder eingeschrumpft bzw. an ihrer Stelle ein „Loch“ entstanden ist. Die Haut regeneriert sich nach erfolgreicher Behandlung. Setzt man die Behandlung zu lange fort, nachdem die Warze entfernt ist, färbt sich die Haut rosa und wird etwas wässrig. Dann ist die Behandlung mit EndWarts CLASSIC unverzüglich abzubrechen. Nach einigen Wochen untersuchen Sie die Stelle, an der die Warze saß; ein kleiner Punkt kann darauf hinweisen, dass noch Warzenreste vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, sollte die Behandlung erneut durchgeführt werden.

3.6 SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Bei Schwangerschaft und Stillzeit sind keine Risiken bekannt.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

EndWarts CLASSIC enthält eine starke Säure. Wenn Sie mehr Lösung angewendet haben als Sie sollten, oder die Lösung falsch angewendet haben, können Hautschäden verursacht werden, siehe 2.1 WANN DÜRFEN SIE ENDWARTS CLASSIC NICHT ANWENDEN. Beachten Sie Punkt 3.1 DOSIERUNG UND ANWENDUNG, um Hautschäden zu vermeiden.

Am Applikationsort kann es zu vorübergehenden Nebenwirkungen kommen, wie z.B. Empfindlichkeit, Stechen, Schmerz, Rötung, Brennen oder Blutung aus den kleinen Gefäßen. Beim Auftreten einer solchen Nebenwirkung unterbrechen Sie die Behandlung, bis die Haut sich vollständig erholt hat.

Bei übermäßiger, fehlerhafter Anwendung oder Verschütten auf die Haut können stärkere Nebenwirkungen verursacht werden, wie z.B. Blasen, Wunden, dunkle Pigmentierung der Haut, Verätzung, Entzündung, Nekrose (Gewebstod) oder Narbenbildung. Die geschädigte Fläche sollte sauber gehalten werden zur Vermeidung von Infektionen. Brechen Sie in entsprechenden Fällen die Behandlung ab und kontaktieren Sie bei schweren Hautschäden einen Arzt.

EndWarts CLASSIC hat einen starken Eigengeruch und kann die Atemwege und Augen reizen. Riechen Sie nicht an der geöffneten Flasche. Nebenwirkungen können z.B. Reizung der Atemwege und/oder des Rachens, laufende Nase, tränende Augen oder Atembeschwerden sein.

In einzelnen Fällen wurde über allergische Reaktionen wie z.B. Rötung, Ausschlag und Juckreiz berichtet.

5. WIE IST ENDWARTS CLASSIC AUFZUBEWAHREN UND WEITERE INFORMATIONEN

Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen.

Inhalt: Farblose bis schwach braune Lösung (Ameisensäure, Wasser, Glycerin, Zitronenöl).

Verpackung: Glasflasche mit kindersicherem Drehverschluss, Gebrauchsanweisung und Wattestäbchen zum Auftragen.

Haltbarkeit: Siehe Haltbarkeitsdatum auf der Flasche und außen auf dem Karton. Danach nicht mehr verwenden.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2017.